

TheraMart


MANUAL DE INSTRUÇÕES



POLTRONA DE ALIMENTAÇÃO

TheraSenior

TM3100

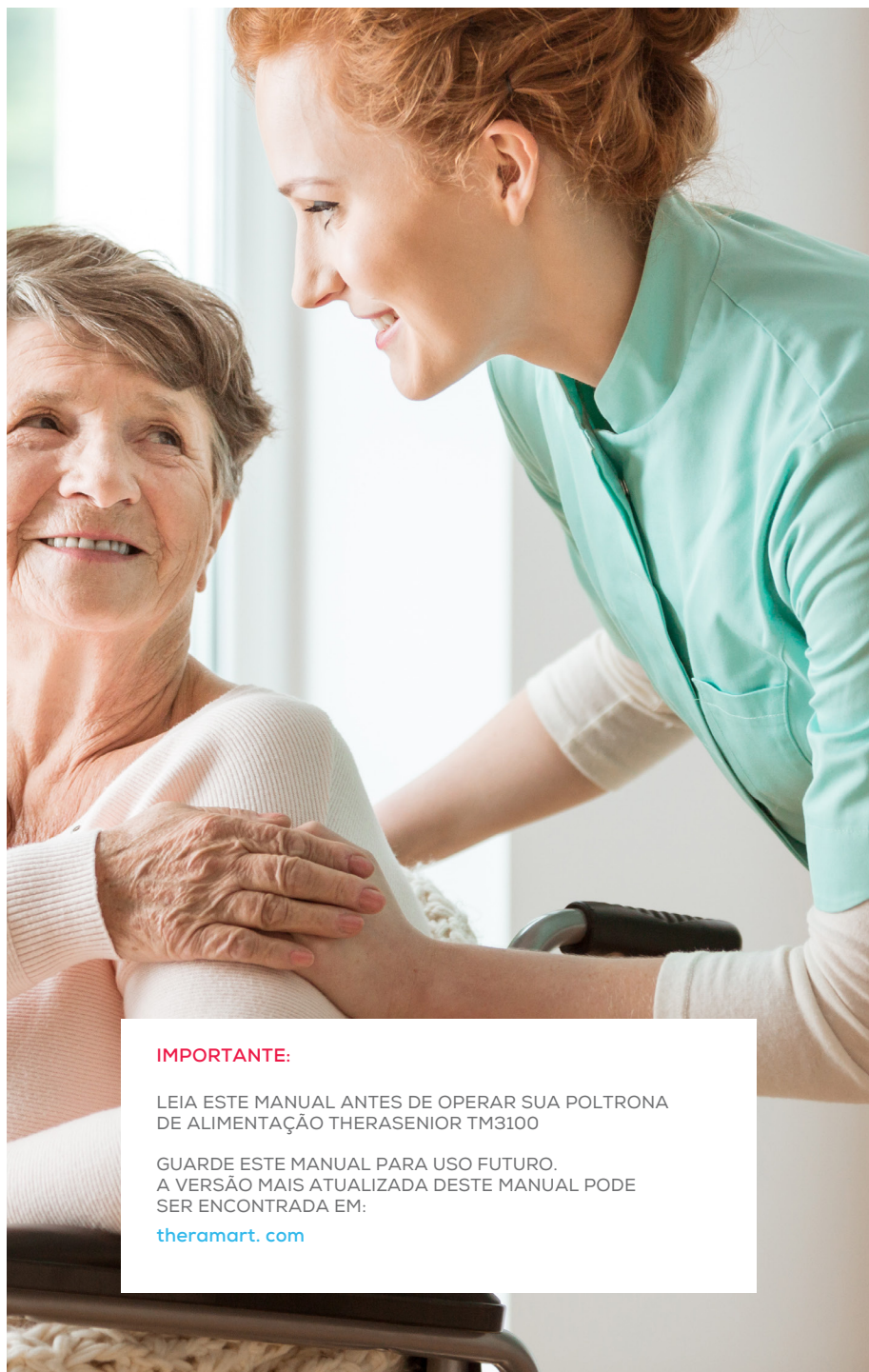

IMPORTANTE:

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR SUA POLTRONA
DE ALIMENTAÇÃO THERASENIOR TM3100

GUARDE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO.
A VERSÃO MAIS ATUALIZADA DESTE MANUAL PODE
SER ENCONTRADA EM:

theramart.com

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	4
USO PREVISTO	4
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA – LER ANTES DE USAR	4
ADVERTÊNCIAS	5
CARACTERÍSTICAS	5
MONTAGEM	6
INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM	6
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	6
MONTAGEM POSTERIOR	6
MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA	6
MONTAGEM DA RODA TRASEIRA	8
FUNCIONAMENTO	8
FUNCIONAMENTO DAS RODAS	8
COMO UTILIZAR COM AS RODAS TRASEIRAS TRAVADAS	9
COMO FUNCIONA O RECLINO	9
COMO RECLINAR (PARA USO DO USUÁRIO)	10
COMO RECLINAR (PARA USO DO CUIDADOR)	10
ESTABILIZAÇÃO DA POSIÇÃO RECLINADA	10
ARTICULAÇÃO DO APOIO DE CABEÇA	11
MESA INCORPORADA	11
ARMAZENAMENTO	12
CUIDADOS E MANUTENÇÃO.....	12
A CADA TRÊS MESES	12
MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS E REMOÇÃO DE MANCHAS	12
RECOMENDAÇÕES CDC	12
CERTIFICAÇÃO CE	14
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	14
GARANTIA LIMITADA	15

INTRODUÇÃO

Este manual contém instruções de montagem, operação e manutenção da poltrona reclinável Therasenior TM3100 de 3 posições. Leia todo o manual com atenção antes de usar a poltrona reclinável e consulte-o durante o uso se tiver dúvidas. Se você tiver mais dúvidas, consulte seu distribuidor local ou entre em contato conosco pelo seguinte e-mail:

info@theramart.com

USO ESPERADO

A poltrona de alimentação Therasenior foi projetada para tornar o atendimento, o tratamento e a recuperação do paciente mais fáceis e confortáveis, ajudando a aliviar o desconforto causado por doenças circulatórias, respiratórias e outras. Therasenior TM3100 suporta um peso de paciente de até 250 lbs (113 kg), DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE.

MEDIDAS IMPORTANTES SEGURANÇA – LEIA ANTES DE USAR

As declarações de segurança apresentadas neste capítulo referem-se a informações básicas de segurança que o usuário do TM3100 deve prestar atenção e cumprir.

Existem declarações de segurança adicionais em outros capítulos ou seções, que podem ser iguais ou semelhantes às seguintes ou específicas para as operações. Observe as seguintes declarações especiais usadas ao longo deste manual e seu significado:



AVISO:

Indica uma situação potencial de perigo ou de uma prática insegura que, se não for evitada, poderá causar morte ou lesões corporais graves.



CUIDADO:

Indica um perigo potencial ou uma prática insegura que, se não for evitado, poderá causar lesões corporais leves ou moderadas.

AVISO:

Indica uma prática potencialmente perigosa ou insegura que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao produto ou à propriedade.

Informações: Fornece recomendações de aplicação ou outras informações úteis para garantir que você aproveite ao máximo seu produto.

AVISOS



AVISO:

Leia todo este manual antes de montar ou usar.



AVISO:

Verifique periodicamente todas as peças e substitua-as, se necessário.



AVISO:

Não use perto de chamas, pois a poltrona reclinável pode ser uma fonte de combustão, causando incêndio, danos materiais e lesões corporais graves.

**AVISO:**

Manutenção e reparo da poltrona de alimentação Therasenior TM3100. DEVE ser realizado por um revendedor autorizado Theramart LLC.

**AVISO:**

A Theramart não se responsabiliza por quaisquer consequências que possam resultar de serviços ou reparos não autorizados.

**AVISO:**

Este produto tem capacidade máxima de peso de 113 kg (250 lb), DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE.

**AVISO:**

As rodas traseiras devem estar sempre travadas, exceto durante o transporte. Ao transferir o paciente da cadeira para outro local, as rodas traseiras devem estar travadas para evitar escorregões.

**AVISO:**

Modificações não autorizadas em sua poltrona reclinável ou uso de peças de reposição que não sejam da Theramart podem alterar a estrutura da poltrona reclinável e criar uma condição perigosa que pode resultar em ferimentos graves e anulará sua garantia.

**AVISO:**

AVISO AOS CLIENTES DA CALIFÓRNIA

Proposição 65 Califórnia: Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo DEHP, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

**AVISO:**

Theramart isenta-se especificamente de responsabilidade por quaisquer lesões corporais ou danos materiais que possam ocorrer durante qualquer uso que não esteja em conformidade com as leis ou decretos federais, estaduais ou locais.



CARACTERÍSTICAS

A poltrona reclinável Therasenior TM3100 de 3 posições é mostrada abaixo, com as principais características marcadas.



MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM

Desembale e inspecione o conteúdo quanto a danos no transporte ou peças faltantes. Se peças estiverem danificadas ou faltando, entre em contato com seu revendedor Theramart imediatamente.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem posterior (veja imagem abaixo)

1. Remova a peça única de montagem posterior da poltrona sem montá-la e reserve.
2. Deslize a junção posterior nos tubos quadrados da junção inferior, conforme mostrado, para que os furos traseiros se alinhem com os furos no suporte horizontal do quadro inferior.
3. Levante a barra de estabilização de posição e ajuste a posição da junção traseira até que o botão de liberação encaixe totalmente na ranhura central da ligação da barra de estabilização de posição, quando a poltrona estiver na posição de armazenamento.
4. Insira os parafusos nos orifícios do suporte horizontal e aperte todos os parafusos com uma chave de fenda.



Montagem posterior



AVISO:

Certifique-se de que o parafuso superior em cada lado do tubo quadrado da junção traseira esteja completamente seguro antes de usar a poltrona reclinável.

MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA



AVISO:

Execute a próxima etapa somente com assistência. Levantar a poltrona reclinável sem ajuda pode causar lesões corporais.

1. Coloque a poltrona reclinável de cabeça para baixo com as pernas da estrutura voltadas para cima.
2. Insira os conjuntos de rodas dianteiras fixas nas pernas dianteiras da estrutura reclinável até que os botões de mola saiam das aberturas de cada lado (conforme mostrado no conjunto da roda dianteira).

Roda da frente

Botão de mola

Orifício dianteiro da estrutura



Montagem da roda dianteira

CONJUNTO DA RODA TRASEIRA

Ferramentas necessárias: duas chaves de 7/16"

1. Insira as rodas traseiras com freios na estrutura traseira da poltrona reclinável, alinhando o orifício na haste da roda e o orifício na estrutura traseira conforme mostrado à direita, até que o os furos estejam alinhados.

2. Prenda as ferragens de fixação da roda traseira (porcas e arruelas) da parte externa da poltrona reclinável através da estrutura traseira e de ambas as hastes das rodas conforme mostrado.

3. Use duas chaves de 7/16" para fixar os acessórios de fixação da roda traseira.



AVISO:

Execute a próxima etapa somente com assistência. Levantar a poltrona reclinável sem ajuda pode causar ferimentos corporais. Coloque a poltrona reclinável com o lado direito voltado para cima e as rodas voltadas para baixo. A poltrona agora está pronta para uso.




AVISO:

Certifique-se de que a poltrona reclinável esteja montada conforme descrito e que todos os componentes estejam seguros antes de usar.

Montagem da roda traseira

Orifício da haste da roda

Orifício dianteiro da estrutura

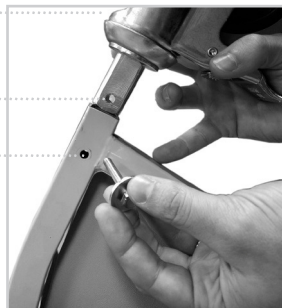

Montagem da roda traseira

RODA TRASEIRA

Roda traseira

Acessório fixação da roda traseira



FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO DAS RODAS



AVISO:

As rodas traseiras devem estar sempre travadas, exceto durante o transporte.

A poltrona reclinável TheraSenior de 3 posições possui rodas de 12,7 cm projetadas especificamente para uso em

ambientes de saúde: duas rodas dianteiras fixas sem travamento e duas rodas traseiras giratórias com freios.

COMO OPERAR AS RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS COM FREIOS

Como travar a roda traseira:

Pressione a alavanca grande do freio localizada na parte traseira da roda. Isso bloqueará a função giratória e a própria roda.

Como desbloquear a roda traseira:

Pressione a pequena alavanca na estrutura da roda. Isso desbloqueará a função giratória e a própria roda.



Roda traseira travada

Alavanca pequena

Alavanca de travamento grande



Roda traseira destravada

COMO FUNCIONA A POLTRONA RECLINÁVEL



A poltrona reclinável, mostrada acima à esquerda na posição vertical e acima à direita na primeira posição reclinada (posição TV), possui três posições que podem ser alcançadas seguindo as instruções a seguir.

AVISO:

Não tente mudar a posição da poltrona reclinável quando a barra de estabilização de posição está engatada; Isto pode danificar o mecanismo de reclinção.

COMO RECLINAR (PARA USO DO USUÁRIO)

Reclinar: Coloque as mãos nos apoios de braços e empurre o corpo contra o encosto da poltrona reclinável para reclinar na posição desejada. O apoio para os pés será ajustado automaticamente.

Voltando à posição vertical: Coloque as mãos nos apoios de braços e levante-se enquanto inclina o corpo para a frente, longe da parte de trás da poltrona reclinável, enquanto empurra as pernas uniformemente para baixo no apoio para os pés.

COMO RECLINAR (PARA USO DO CUIDADOR)



AVISO:

Certifique-se de que a barra de estabilização de posição esteja na posição retraída.

- Recline para a primeira posição reclinada (posição TV): parado em cada lado da poltrona reclinável, segure o apoio de braço com uma mão e empurre a alça acolchoada para baixo para reclinar até a primeira posição reclinada. Se esta for a posição final desejada, ajuste a barra de estabilização de posição.

- Recline para a segunda posição de reclinção (posição de reclinção total): Depois de reclinar-se para a primeira posição reclinada simples (conforme indicado no parágrafo anterior), segure o apoio de braço com uma mão e empurre para baixo a alça acolchoada de novo. Se esta for configuração final desejada, ajuste a barra de estabilização de posição.

- Retornar à posição vertical: Puxe a alça acolchoada para frente. Ajuste a barra de estabilização de posição



Montagem posterior

ESTABILIZAÇÃO DA POSIÇÃO RECLINÁVEL

Para estabilizar a posição reclinada:

Ajuste a poltrona reclinável para a posição desejada conforme descrito acima, puxe o botão de liberação para liberar a barra de estabilização de posição da posição retraída e gire a barra de estabilização de posição para baixo até que os entalhes estejam

completamente enganchadas sobre os pinos de travamento.

Para liberar a posição reclinada:
Levante a barra de estabilização de posição para desenganchar os pinos de travamento. Enquanto segura o botão de liberação para fora, gire a barra de estabilização de posição totalmente para cima até que ela esteja completamente encostada no encosto do assento. Solte o botão de liberação para manter a barra de estabilização de posição na posição retraída.



JUNTA DO CABEÇOTE

O usuário ou cuidador pode ajustar o apoio de cabeça articulado na posição desejada puxando-o para frente ou para trás.



MESA INTEGRADA

Funcionamento

Consulte a imagem acima.

1. Puxe a mesa para cima enquanto segura os botões de liberação sob ambos os braços até que ela trave; em seguida, deslize as chaves de bloqueio/desbloqueio para frente em ambos os lados.
2. Levante a mesa pelo braço circular da mesa e deslize-a nos tubos receptores da mesa na frente de cada braço. A mesa pode deslizar para dentro e para fora mantendo a tecla de bloqueio/desbloqueio para frente.
3. A mesa pode ser fixada em uma das cinco posições: puxe para baixo e segure o botão de liberação e deslize a chave para trás. Mova a outra chave de bloqueio/desbloqueio para trás. A mesa agora estará segura.

ARMAZENAMENTO

A mesa é armazenada no tubo de armazenamento da mesa embaixo do apoio de braço esquerdo, deixando a parte superior da mesa voltada para fora.

CUIDADO E MANUTENÇÃO



AVISO:

Verifique periodicamente todos os elementos e substitua-os, se necessário.

A CADA TRÊS MESES

- Verifique e limpe as rodas.
- Aperte os parafusos em cada perna que fixam as rodas ao quadro.
- Verifique os freios das rodas.
- Verifique e limpe o mecanismo de estabilização de posição.
- Verifique o funcionamento do mecanismo da poltrona em todas as posições com o assistente sentado na poltrona.

MANUTENÇÃO DO ESTOFADO E REMOÇÃO DE MANCHAS

- Sujidade comum: lavar com água morna e sabão ou detergente neutro.
- Sujidade persistente: Utilizando uma escova de cerdas macias, lave com água morna e sabão ou detergente neutro.
- Sujidade incrustada: esfregar com sabão de limpeza em pó ou detergente similar.
- Chiclete: raspe com cuidado; remova com querosene ou gasolina.

- Acetona e esmalte de unhas: Seque imediatamente para evitar danos.
- Caneta: seque imediatamente com um pano branco umedecido em água ou óleo mineral.
- Tinta, graxa de sapato, marcas de sapato: remova imediatamente! Use um pano branco umedecido com querosene, gasolina ou aguarrás. Não use removedor de tinta ou limpadores líquidos para pincéis.
- Breas, asfalto, creosoto: retirar para evitar manchas. Limpe a superfície com querosene ou gasolina.



AVISO:

Ao usar querosene ou gasolina, faça isso em um área bem ventilada e mantenha-o longe do fogo e das chamas.

- Enceramento e repintura: melhora a resistência ao desgaste. Use cera em pasta de qualquer qualidade.
- Uma solução diluída de 10% (ou menos) de alvejante pode ser usada para limpar a poltrona reclinável.

RECOMENDAÇÕES DO CDC

ESTRATÉGIAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES AMBIENTAIS PARA ESTOFADOS, REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISOS VINÍLICOS EM ÁREAS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES

- Selecione desinfetantes registrados na EPA, se disponíveis, e use-os de acordo com as instruções do fabricante.

- Não use desinfetantes de alto nível/esterilizantes químicos líquidos para desinfecção de instrumentos e dispositivos não críticos ou quaisquer superfícies ambientais; Tal utilização é contrária às instruções do rótulo para estes produtos químicos tóxicos.

- Siga as instruções dos fabricantes para limpeza e manutenção de equipamentos médicos não críticos.

- Na ausência de instruções de limpeza do fabricante, siga determinados procedimentos:

- Limpe as superfícies de equipamentos médicos não críticos com um detergente neutro/desinfetante.

- Não use álcool para desinfetar o entorno de grandes superfícies.

- Use uma capa protetora apropriada para superfícies não críticas que:

- São frequentemente tocados com luvas cirúrgicas durante a prestação de cuidado com o paciente.

- Podem estar contaminados com sangue ou substâncias corporais.

- São difíceis de limpar (por exemplo teclados de computador).

- Mantenha as superfícies de limpeza (por exemplo, pisos, paredes, mesas) visivelmente limpas com frequência e limpe os derramamentos imediatamente.

- Use um processo de uma etapa e um detergente/desinfetante de nível hospitalar registrado pela EPA, projetado para finalidades

de limpeza geral em áreas de atendimento a pacientes onde:

- Há incerteza quanto à natureza da mancha na superfície (se sangue, fluidos corporais ou simplesmente poeira ou sujeira normal).

- Existe incerteza quanto à presença de organismos multirresistentes em tais superfícies

- O detergente e a água são adequados para a limpeza de superfícies em áreas que não sejam de atendimento a pacientes (por exemplo, escritórios administrativos). Limpe e desinfete superfícies de alto contato com mais frequência do que superfícies de pouco contato. Limpe paredes, persianas e cortinas de janelas nas áreas de atendimento ao paciente quando estiverem visivelmente sujas ou empoeiradas.

- Não borrife desinfetante nas áreas de atendimento ao paciente.

- Evite métodos de limpeza de grandes superfícies que produzam névoas ou aerossóis ou dispersem poeira nas áreas de atendimento ao paciente.

- Siga os procedimentos adequados para o uso eficaz de esfregões, panos e soluções.

- Prepare soluções de limpeza diariamente ou conforme necessário e substitua-as frequentemente por soluções novas, de acordo com as políticas e procedimentos da instalação.

- Troque a cabeça do esfregão no início de cada dia e também conforme exigido pela política da instalação ou após limpar grandes derramamentos de sangue ou outras substâncias corporais.
- Limpe esfregões e panos após o uso e deixe-os secar antes de usá-los novamente; ou use esfregões descartáveis de uso único.
- Ao realizar desinfecção de nível baixo ou intermediário de superfícies ambientais em berçários e unidades neonatais, evite a exposição desnecessária de recém-nascidos a resíduos de desinfetantes nessas superfícies usando germicidas registrados na EPA, de acordo com as instruções e avisos de segurança do fabricante.



POLTRONA DE ALIMENTAÇÃO
TheraSenior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para completar todas as especificações técnicas, entre em contato com info@theramart.com

Especificação	SKU TM3100
Atende às especificações CA-TB133	- X
Altura média	120 centímetros
Largura média	63,5 centímetros
Profundidade média	104 centímetros
Largura entre os braços	50 centímetros
Altura do braço a partir do chão	66 centímetros
Altura do braço a partir da cadeira	23 centímetros
Altura da cadeira	53 centímetros
Largura da cadeira	48 centímetros
Profundidade da cadeira	48 centímetros
Peso de envio	50kg
Capacidade máxima de peso	250 libras (113 kg) DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE

GARANTIA LIMITADA

ESCOPO DA GARANTIA

A Theramart garante apenas ao comprador original que substituirá ou reparará apenas itens, a critério exclusivo da Theramart, que apresentem defeitos de material ou de fabricação sob uso e serviço normais. Todas as garantias estão condicionadas ao uso adequado dos produtos estritamente de acordo com as boas práticas comerciais, instruções e manuais aplicáveis da Theramart, incluindo uso e manutenção adequados. Na medida em que um item seja garantido por terceiros, a Theramart transfere todos os seus direitos sob essa garantia ao comprador original, na medida permitida. Esta garantia limitada se aplicará apenas a defeitos relatados à equipe de atendimento ao cliente da Theramart dentro do período de garantia aplicável e que, após examinado pela Theramart ou seu representante autorizado, sejam considerados um item de garantia. Esta garantia limitada não é transferível. Dentro das diretrizes aqui estabelecidas, são garantidos os seguintes itens pelo prazo abaixo indicado:

Marco: um ano
Estofado: um ano
Todos os outros itens: um ano

O período de garantia aplicável começará a partir da data de envio ao cliente original, a menos que haja uma data de vencimento no item, caso em que a garantia expirará no período de garantia ou na data de vencimento, o que ocorrer primeiro.

COMO OBTER SERVIÇO DE GARANTIA

Esta garantia limitada se aplicará apenas a defeitos relatados ao revendedor de quem o cliente adquiriu o produto dentro do período de garantia aplicável. Se não houver distribuidor, você deve entrar em contato diretamente com a Theramart ligando para +(1) (305) 521 9440 ou enviando uma solicitação por e-mail para infor@theramart.com. O representante do atendimento ao cliente fornecerá instruções específicas. O não cumprimento de instruções específicas resultará na negação da reivindicação de garantia.

EXCEÇÕES

A garantia não cobre e a Theramart não será responsável por:

- 1) Defeitos, danos ou outras condições causadas, no todo ou em parte, por uso indevido, abuso, negligência, alteração, acidente, dano de transporte, alteração ou falha em buscar e obter reparo ou substituição em tempo hábil;
- 2) Produtos que não são instalados, usados ou limpos e mantidos adequadamente conforme exigido no manual oficial do produto correspondente;
- 3) Produtos considerados de natureza não durável, e isso inclui, mas não está limitado a: rodas, filtros, fusíveis, juntas, lubrificantes e placas;
- 4) Acessórios ou peças não fornecidos pela Theramart;
- 5) Cobranças de qualquer pessoa por ajustes, reparos, peças de reposição, instalação ou outros trabalhos executados ou em conexão com tais produtos que não sejam expressamente autorizados por escrito, antecipadamente, pela Theramart;
- 6) Quaisquer custos de mão de obra ou envio incorridos na instalação ou reparo da peça de reposição;
- 7) Os custos e despesas de manutenção e limpeza regulares;
- 8) Declarações e garantias feitas por qualquer pessoa ou entidade que não seja a Theramart.

ISENÇÃO DE GARANTIA TOTAL, RECURSO EXCLUSIVO E DANOS CONSEQUENCIAIS

ESTA GARANTIA É A ÚNICA GARANTIA DA THERAMART E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. A THERAMART NÃO OFERECE GARANTIAS IMPLÍCITAS DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. SE FOR MOSTRADO AO CLIENTE QUALQUER MODELO OU AMOSTRA, TAL MODELO OU AMOSTRA **FOI UTILIZADO APENAS PARA ILUSTRAR O TIPO GERAL E A QUALIDADE DO PRODUTO E NÃO REPRESENTA NECESSARIAMENTE O PRODUTO EM SI.** ESTA GARANTIA ESTÁ LIMITADA AO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS. A GF NÃO SERÁ RESPONSÁVEL E AQUI RENUNCIA A QUAISQUER DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INDIRETOS, SECUNDÁRIOS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A: DANOS POR PERDA DE LUCROS OU RECEITAS, PERDA DE USO, DURAÇÃO, COBERTURA OU SALÁRIOS, PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS OU CONTRATANTE INDEPENDENTE.

As garantias aqui contidas contêm todas as representações e garantias com relação ao assunto e substituem todas as negociações, acordos e entendimentos anteriores com relação ao mesmo.

O destinatário deste documento reconhece e declara que não se baseou em qualquer representação, afirmação, garantia, contrato de garantia ou outra garantia, exceto conforme aqui estabelecido.

Para obter mais informações sobre este produto ou esta garantia, entre em contato com um representante de atendimento ao cliente Theramart.

AVISOS:

- 1) Termos e condições adicionais podem ser aplicados.
- 2) As reclamações de transporte deverão ser anotadas nos documentos de embarque correspondentes e deverão ser feitas com urgência. Regulamentações internacionais, federais e estaduais regem os requisitos específicos para reclamações de transporte. O não cumprimento desses regulamentos pode resultar na negação da reivindicação de transporte. Theramart irá ajudá-lo a registrar a reclamação de transporte.
- 3) As reclamações para quaisquer remessas curtas deverão ser feitas dentro de três (3) dias a partir da data da fatura.

TheraMart | POLTRONA DE ALIMENTAÇÃO | TheraSenior



INFORMAÇÕES DE CONTATO

Miami, Flórida. EUA
+(1) (305) 521 9440

parceiro@theramart.com
www.theramart.com.br